

MIGMA 200

Die Masse für den präzisen Abdruck ist eins, zwei fertig.



1 Mischdauer auf der Skala einstellen.



2 Alginat nach Anweisung des Herstellers abmessen und in Mischbecher einfüllen.



3 Wassermenge mit Messbecher des Herstellers oder optional erhältlicher Dosierflasche abmessen und hinzufügen.



4 Deckel aufsetzen und mit leichter Rechtsdrehung bis zum Klick schliessen.



5 Mischbecher kurz auf und ab schütteln.



6 Mischbecher einsetzen und Deckel des Gerätes schliessen.



7 START drücken. Gerät stellt nach dem Mischprozess automatisch ab.



8 Alginat mit Spatel dem Mischbecher entnehmen.



9 Inert Sekunden eine homogene, blasenfreie Abdruckmasse.

MIKRONA TECHNOLOGIE AG

Wigartestrasse 8, CH-8957 Spreitenbach, T +41 56 418 45 45, F +41 56 418 45 00, swiss@mikrona.com

MIKRONA DENTALTECHNIK VERTRIEBS-GMBH

Jägerallee 26, DE-14469 Potsdam, T+49 331 740 38 28, F+49 331 740 38 24, germany@mikrona.com

www.mikrona.com

MIKRONA
The Swiss Dental Technology